

130 x 180 mm			
Myriad Pro Regular, Bold	7pt		
Raleway Semibold	9pt		
Raleway Medium	20pt		

# OKUZELL



forte

## oční kapky

Sterilní, zvlhčující oftalmický roztok s hyaluronátem sodným 0,4% 10 ml lahvička

**Složení:** Hyaluronát sodný 0,4%, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda.

Zdravotnický prostředek. Bez konzervačních látek.

### Co obsahují OKUZELL forte oční kapky?

OKUZELL forte oční kapky jsou sterilní oční roztok. Balení obsahuje jednu lahvičku o objemu 10 ml, která odpovídá více než 250 kapkám a je vybavena inovativním a patentovaným vícedávkovým Oftalmickým stlačovacím dávkovačem (OSD) bez konzervačních látek.

OSD zaručuje, že škodlivé bakterie se nedostanou do roztoku, který zůstává sterilní po dobu až 120 dnů po prvním použití.

### Co jsou oční kapky OKUZELL forte?

OKUZELL forte oční kapky jsou 0,4% oftalmický roztok vysokomolekulárního hyaluronátu sodného, získaného biotechnologickou syntézou. Hyaluronát sodný má mukomimetické, mukoadhezivní a viskoelastické vlastnosti, které zlepšují stabilitu slzného povlaku a udržují oční povrch zvlhčený, hydratovaný a chráněný.

### Kdy by měly být oční kapky OKUZELL forte užívány?

Zvlhčující a ochranné vlastnosti hyaluronátu sodného nabízejí úlevu při podráždění, pocitu suchosti, pálení a pocitů cizího tělíska v očích v důsledku vlivů okolního prostředí jako je vítr, slunce, suchý vzduch, slaná voda, kouř, nadměrné světlo, klimatizace, vytápění, dlouhodobé používání počítače nebo v případě oční operace, konjunktivitidy nebo častého a dlouhodobého používání kontaktních čoček.

### Jak používat oční kapky OKUZELL forte?

1 kapka do každého oka 2-3 krát denně, dle potřeby.

Vytlačte jednu kapku do oka tak, že lehce mačkáte lahvičku.

### Preventivní opatření a varování

- Nepoužívejte kapky, pokud je lahvička poškozená.
- Nepoužívejte paralelně s produkty obsahujícími kvartérní amoniové soli.
- Nepoužívejte v případě citlivosti na kteroukoli z obsažených látek.
- Nepoužívejte po datu expirace, uvedeném na lahvičce a vnějším obalu.
- Nedotýkejte se oka špičkou lahvičky.
- Po podání může být ve výjimečných případech pozorováno dočasné mírně rozmazané vidění kvůli

viskozitě roztoku. Proto je vhodné počkat několik sekund před každou činností, která vyžaduje ostré vidění.

- Vyčkejte s podáním jiných očních léků po vnější použití nejméně 10-15 minut.
- Lahvičku zlikvidujte 120 dní po prvním otevření.
- Po užití zlikvidujte lahvičku náležitým způsobem.
- Neponěchávejte je v dosahu dětí.
- Nepolykejte.
- Tento výrobek je určen výlučně pro oftalmické použití.
- Skladujte při pokojové teplotě.
- Produkt je obvykle určen k nepřetržitému používání po dobu nejvýše 30 dnů; Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Výrobek obsahuje fosfáty. U některých pacientů s významně poškozenou rohovkou byly hlášeny vzácné případy kalcifikace rohovky při použití očních kapek obsahujících fosfáty. Proto se nedoporučuje použití u pacientů se závažným poškozením povrchu rohovky (výrazná eroze nebo vřed rohovky).

Další informace:  
Pharmaselect CZ s.r.o.,  
Rudka 123, 664 83 Rudka  
e-mail: info@pharmaselect.cz

Datum kontroly: 08/2017



Výrobce:  
NTC SRL  
Via Luigi Razza, 3  
20124 Milan, Itálie



+25°C  
+2°C

STERILE A

CE 0476

# OKUZELL



forte

## očné kvapky

Sterilný zvlhčujúci roztok s hyaluronátom sodným 0,4 %, fľaštička 10 ml

**Zloženie:** Hyaluronát sodný 0,4 %, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda.

Zdravotnícka pomôcka. Bez konzervačných látok.

### Opis balenia a roztoku.

Očné kvapky OKUZELL forte sú sterilný očný roztok. Balenie obsahuje jednu 10 ml fľaštičku, čo je ekvivalent 250 kvapiek. Fľaštička je vybavená inovatívnym a patentovaným dávkovacím prvkom Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD) bez ochranného krytu. OSD zabráňuje preniknutiu škodlivých baktérií do roztoku, ktorý zostáva sterilný až 120 dní od prvého otvorenia.

### Čo sú to očné kvapky OKUZELL forte?

Očné kvapky OKUZELL sú 0,4 % očný roztok s hyaluronátom sodným s vysokou molekulovou hmotnosťou získanou biotechnologickou syntézou. Hyaluronát sodný má mukomimetické, mukoadhezívne a viskoelastické vlastnosti, ktoré vylepšujú stabilitu slzného filmu a celkové pohodlie a udržiavajú povrch oka lubrikovaný, hydratovaný a chránený.

### Kedy je vhodné použiť očné kvapky OKUZELL forte?

Zvlhčujúce a ochranné vlastnosti hyaluronátu sodného zmiernujú podráždenie, vysychanie, pálenie a pocit prítomnosti cudzieho predmetu v očiach, spôsobené environmentálnymi vplyvmi, ako je vietor, slnko, suchý vzduch, slaná voda, dym, nadmerné svetlo, klimatizácia, kúrenie, dlhodobé používanie počítača alebo v prípade chirurgického zásahu, zápalu spojiviek alebo častého a dlhodobého používania kontaktných šošoviek.

### Ako používať očné kvapky OKUZELL forte?

1 kvapka do každého oka 2-3 krát denne, podľa potreby.

Vyvíňte mierny tlak na telo fľaštičky a kvapnite do oka jednu kvapku.

### Varovania a upozornenia

- Ak je nádoba poškodená, produkt nepoužívajte.
- Nepoužívajte súčasne s prípravkami, ktoré obsahujú kvartérne amóniové soli.
- Nepoužívajte, ak ste precitlivý na ktorúkoľvek zo zložiek.
- Nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na fľaštičke a na vonkajšom obale.
- Špičkou fľaštičky sa nedotýkajte oka.
- Po podaní sa v zriedkavých prípadoch môže pre-

javiť dočasné mierne rozmazanie videnia z dôvodu viskozity roztoku. Je preto vhodné počkať niekoľko sekúnd pred zahájením akejkoľvek činnosti, ktorá vyžaduje ostré videnie.

- Pred podaním ďalších očných liekov by malo uplynúť najmenej 10 až 15 minút.
- Po 120 dňoch od prvého otvorenia fľaštičku zlikvidujte.
- Po spotrebovaní zlikvidujte fľaštičku vhodným spôsobom.
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
- Nepožívkajte.
- Tento produkt je určený výhradne na očné použitie.
- Skladujte pri izbovej teplote.
- Produkt je za normálnych okolností určený na súvislé používanie nie dlhšie ako 30 dní; ak symptómy pretrvávajú, navštívte lekára.
- Produkt obsahuje fosfáty. U niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou boli počas používania očných kvapiek s obsahom fosfátov zaznamenané veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie rohovky; z toho dôvodu neodporúčame používanie očných kvapiek u pacientov s vážnym poškodením povrchu rohovky (napríklad erózia alebo ulcerácia rohovky).

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Pharmaselect SK s.r.o.,  
Rudka 123, 664 83 Rudka  
e-mail: info@pharmaselect.cz

Dátum revízie: 08/2017



Výrobca:  
NTC SRL  
Via Luigi Razza, 3  
20124 Milan, Taliansko



+2°C

STERILE A



0476