

Oční kapky. Zdravotnický prostředek. Bez konzervačních látek. Hyaluronát sodný 0,2 %

### Složky

Hyaluronát sodný 0,2 %, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný a čištěná voda.

### Popis

Okuzell one je sterilní viskoelastický čirý roztok bez konzervačních látek pro použití na rohovku. Obsahuje pouze látky, které se přirozeně vyskytují v oku. Okuzell one chrání a zvlhčuje povrch oka a lubrikuje jej. Poskytuje tak dlouhodobou úlevu očím, které jsou suché v důsledku:

- keratoconjunctivitis sicca (Sjörgenův syndrom)
- poranění rohovky, eroze, operace rohovky
- nošení kontaktních čoček
- hormonální poruchy, menopauzy
- klimatizace, větru, chladu, suchého tepla, prachu, kouře, znečištěného ovzduší
- práce u počítačového monitoru, dlouhého řízení automobilu a dálkových letů
- plavání v chlorované vodě

### Skladování

Skladujte při teplotě 2 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem.


### Bezpečnostní opatření a varování

- Nepoužívejte, pokud je poškozený plombovací kroužek víčka nebo lahvičky.
- Nedovolte, aby se lahvička dotkla Vašeho oka.
- Kvůli riziku kontaminace se vyvarujte kontaktu špičky lahvičky s jinými povrchy nebo rukama.
- Nepoužívejte společně s jinými léky na oči.
- Neaplikujte na infikované oči.
- Po použití může být dočasně snížena zraková ostrost. V takovém případě neřidte automobily ani neobsluhujte stroje a vyčkejte, dokud se neobnoví normální vidění.
- Poznamenejte si na lahvičku datum jejího prvního otevření.
- 180 dní po odstranění plombovacího kroužku víčka by měla být lahvička zlikvidována v komunálním odpadu.


### Velikost balení

10 ml


### Návod k použití

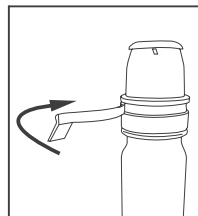


1. Před prvním použitím odstraňte plombovací kroužek z víčka, poté můžete Okuzell one používat po dobu až 180 dní.

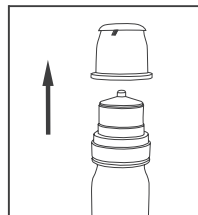

2. Odstraňte víčko.

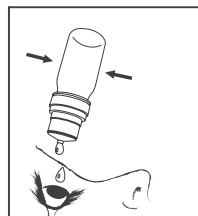

3. Stisknutím boku lahvičky vytlačte jednu kapku přímo do oka nebo na kontaktní čočku.

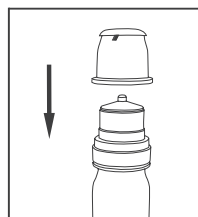

4. Po použití lahvičku znovu uzavřete víčkem.

Další informace lze získat na následující adrese:

Pharmaselect CZ s.r.o. / U vily 463  
691 05 Zaječí / Česká republika  
Email: info@pharmaselect.cz  
www.pharmaselect.cz